

# あなたのマスク装着方法は大丈夫ですか？


高性能のマスクでも装着方法を誤れば機能をはたしません。例えば・・・

ノーズピースとプリーツ(ひだ)を合わせていない。




鼻の横の隙間から入ってしまう。

口だけを覆い、鼻は出ている。

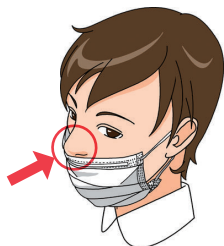

自分の咳などが飛散しない効果はあるが自分の保護ができない。

着用していたマスクを顎にかける。

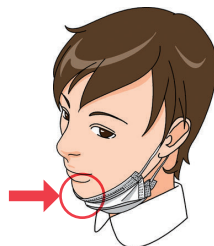

顎の部分には飛散物が付着している恐れがあり、それがマスクの内側についてしまう。

ゴムひもが緩い。



肌との接着面の数ヶ所に隙間ができてくる。



マスクの装着は顔との密着性が大切です。手順を守って正しく装着しましょう。



**ゴムひもを溶着している面を外側にして装着してください。**



1. イヤーループは外側にして、プリーツ(ひだ)を上下に伸ばし、マスクを完全に広げます。



2. 顔に当て、ノーズピースを鼻の形に合わせて顎の下まで伸ばします。



3. 顔にフィットさせながら、耳にひもを掛けてください。

レギュラーサイズ

Sサイズ

プロレーンマスク  
LATEX-FREE



2714 : ホワイト



2715 : ブルー



2716 : ピンク



2714S : ホワイト



2716S : ピンク