

メディコム 滅菌ロール



オートクレーブ/EOガス用インジケータ付き

ボックス入り



メディコム 滅菌ロールの特長

- 自由な長さにカットできる滅菌ロールです。
- 被滅菌物の大きさに合わせて、フレキシブルにご使用できます。
- スムーズに開封でき、紙剥けやフィルム裂けがなく安全で衛生的です。
- ボックス入りタイプなので、専用ディスペンサーが不要です。
- ISO11140・Class1のプロセスインジケータを採用、滅菌条件を通過したか否かの確認がしやすくなりました。
- 滅菌中に被滅菌物に印刷インクが移らないよう、インクを強化しました。
- 水性インクの使用により、環境への配慮も行っております。
- 片面が透明着色フィルムのため、内容物の確認がしやすく、シール状況が一目でわかります。 ※封印用のシーラーが必要です。

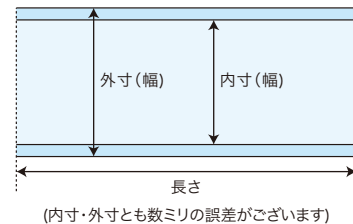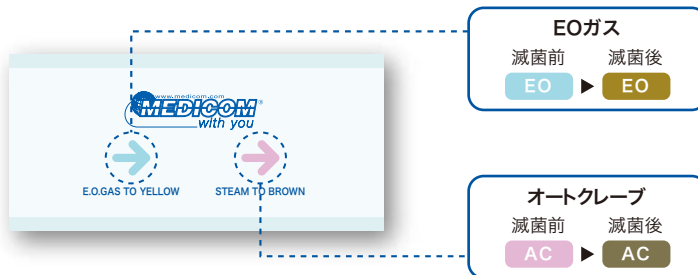

※印刷の為、実際の色とは多少異なることがあります。
※インジケータは化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程にさらされたか否かを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

オートクレーブ・EOガス両用

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード	参考医院価格
8862-9510	幅50mm×長さ200m	30mm	1ケース/6ロール	4897008630836	オープン
8862-9520	幅75mm×長さ200m	55mm	1ケース/4ロール	4897008630843	オープン
8862-9530	幅100mm×長さ200m	80mm	1ケース/3ロール	4897008630850	オープン
8862-9540	幅150mm×長さ200m	130mm	1ケース/2ロール	4897008630867	オープン
8862-9550	幅200mm×長さ200m	180mm	1ケース/4ロール	4897008631772	オープン
8862-9560	幅250mm×長さ200m	230mm	1ケース/4ロール	4897008631789	オープン
8862-9570	幅300mm×長さ200m	280mm	1ケース/2ロール	4897008631796	オープン
8862-9580	幅350mm×長さ200m	330mm	1ケース/2ロール	4897008631802	オープン

【ご使用上の注意】

● 滅菌ロールのご使用は1回限りでお願いします。(再使用はおやめ下さい。) ● 保管の際は、水濡れに注意し、酸・アルカリ・殺菌消毒剤・直射日光・紫外線・蛍光灯・高温多湿等を避けて下さい。(滅菌紙の劣化や、インジケータの変色等、滅菌ロールの品質を損なう恐れがあります。) ● 乾熱滅菌器ではご使用できません。 ● ケミクレーブ滅菌でのご使用はできません。 ● 常温で保管し、滅菌後約6ヶ月以内でのご使用をおすすめします。

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

