

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック
非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

プロケア ニトリルグローブ ブルー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【包装】

100 枚入／箱

【形状・構造及び原理等】

- 非天然ゴム製パウダーフリー
アレルギーの原因の一つであるプロテインを含まない手に優しいニトリル
ゴム製グローブ
- 使い捨てタイプ
- 左右兼用、未滅菌

【使用目的又は効果】

手術を除いた、検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り
扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成
ゴム手袋。

【使用方法等】

箱を開封して、グローブを取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 複数の患者には使用しないでください。
 - 合成ニトリルゴムは、体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状をまれ
に起こすことがあります。このような症状を起こした場合には使用を中
止し、適切な処置を施してください。
 - 包装が破損していたり、汚損していたり、異物などの異常が認められ
た場合には、使用しないでください。
 - 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご
注意ください。
 - 本品を廃棄する場合は、感染防止に留意し安全な方法で処分して
ください。
2. 相互作用
 - 薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますの
で確認の上、使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所を避け
て常温で保管してください。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
2. 有効期間
 - 上記保管条件のもとで、包装後 5 年（製造元データによる）

【製造販売業者及び外国製造所国名】

- 製造販売業者
A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目 2 番 10 号読売神戸ビル 9 階
TEL 078-327-2333
- 外国製造所国名
中華人民共和国