

イルガサンDP-300
(トリクロサン)
FREE

器具の血液・タンパク汚れをスプレー泡で分解

アニオザイム プライム

ANIOSYME PRIME



様々な
ウイルス・細菌に
高い除菌効果を
発揮



用途

診療器具の洗浄・除菌
血液・タンパク汚れの分解と凝固防止

スプレーした表面を湿潤に保ち、血液やタンパクの凝固を防ぎます。

アルデヒドフリー

材質を選ばず使用可能

(ステンレス、チタン、スチール、ガラス等にも使用可)

泡タイプ

高密度の泡で器具を均一にカバー

主成分

- ・ DDAC-B
(炭酸ジデシルジメチルアンモニウム+非イオン界面活性剤)
- ・ 金属イオン封鎖剤
- ・ 酵素複合体 (プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ)
- ・ 賦形剤

清拭による洗浄と除菌が一度で完了

1.



本品をあらかじめ浸漬槽にスプレーしておき、その上に洗浄する診療器具を並べます。

2.



その上からもう一度スプレーし、器具全体をまんべんなく泡で覆うようにします。

3.



浸漬槽にきちんと蓋をします。

4.



所定の時間が経過したら(時間は対象となる菌によって異なります)、流水で器具をすすいでください。その後、機械による洗浄、または手作業での洗浄を行ってください。

●すべての菌を除菌するわけではありません。●安全のため、ご使用の際はグローブを着用ください。●5℃~35℃の間で保管してください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●直射日光の当たる場所には保管しないでください。

品番	内容量	入り数	EANコード(本体)	EANコード(外箱)
ANI2367544	750ミリリットル	12本/ケース	3597610409714	3597610409707

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

