

小器具の一次洗浄に最適 アニオザイム エックススリー ANIOSYME X3



様々な
ウイルス・細菌に
高い除菌効果を
発揮

探針やミラーなど、小器具の浸漬洗浄
汚れが激しい場合の超音波洗浄

滅菌前の除菌と洗浄をこれ1つで行っていただけます。
塩素やアルデヒドを含んでいないため、
器具の腐食やタンパク質汚れの凝固の心配がありません。



3種類の酵素洗剤

プロテアーゼ
タンパク質

リパーゼ
脂質

アミラーゼ
糖質

- 中性
 - アルデヒドフリー
 - 100倍濃縮タイプ
- 材質を選ばず使用可能
トータルでの使用量が経済的

主成分

- ・第四級アンモニウムプロピオネート
- ・ジグルコン酸クロルヘキシジン
- ・酵素複合体（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ）
- ・非イオン界面活性剤、賦形剤、香料、着色料

一次洗浄と除菌が1ステップで完了、優れた除菌効果を発揮



本品を1%に希釈します。(水2.5リットルの場合、原液25ミリリットル)
5リットルボトルはポンプ1押しが25ミリリットルです。

容器に入れて器具を完全に浸漬し、蓋をしてください。
所定の時間が経過したら、容器から取り出してください。
(浸漬時間は対象となる菌によって異なります)

コンテナの中に水を張り、水中にて目に見える汚れを落としてください。
※少量の水を流しつつ下さ

超音波洗浄機に1%希釈になるように、エックススリーを入れます。
超音波洗浄機にすすいだ器具を入れ、超音波洗浄を行います。

仕上げにもう一度すすぎを行い、しっかりと拭き取れば終了です。

- 希釈液の水温は60℃以上にならないようにしてください。酵素菌が死滅します。●酵素菌の動きが活発な温度は、40℃前後とされています。
- すべての菌を除菌するわけではありません。●安全のため、ご使用の際はグローブを着用ください。
- 洗浄液は連続して使用することが可能ですが、1日に少なくとも1度は交換を行ってください。●5℃~35℃の間で保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。●直射日光の当たる場所には保管しないでください。



動画はこちらから

品番	内容量	入り数	EANコード(外箱)
ANI2633036	5リットル	4本/ケース	3597610457425
ANI2633095	1リットル	12本/ケース	3597610457418

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

