

ANIOSYME X3

アニオザイム エックススリー



アニオザイム エックススリー
ANIOSYME X3は、3種類の酵素を含有した中性酵素洗浄剤です。浸漬洗浄にも超音波洗浄にも使用でき、3種類の酵素が汚れを強力に分解するとともに、すぐれた除菌効果を発揮しますので、特に手術器具や内視鏡器具の洗浄に適しています。

特長

- ✓ 滅菌前の除菌と洗浄をこれ1つで行っていただけます。
- ✓ 塩素やアルデヒドを含んでいないため、器具の腐食やタンパク質汚れの凝固の心配がありません。
- ✓ 希釈するタイプですので、経済的にお使いいただけます。

除菌効果

多種多様なウイルス、バクテリア等に除菌効果を発揮します。

主成分

第四級アンモニウムプロピオネート、ジグルコン酸クロルヘキシジン、酵素複合体（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ）、非イオン界面活性剤、賦形剤、香料、着色料

容量

- ・ 1リットルボトル
- ・ 定量ポンプ付き5リットルボトル

ご使用になる前に

- ・ 安全のため、グローブ・マスク・フェイスシールド・ガウン等を着用してください。

その他ご注意ください

- ・ 5°C～35°Cの間で保管してください。
- ・ お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所には保管しないでください。

品番：ANI2633036
入り数：4本/ケース
EANコード：3597610457425



品番：ANI2633095
入り数：12本/ケース
EANコード：3597610457418



使用方法


1

0.5%に希釈します。
5リットルの水に対して本品25mlを加えて希釈してください。




2

器具を洗浄剤に完全に浸漬させます。
そのまま5分以上置き、汚れがひどい場合はブラッシングで洗浄してください。

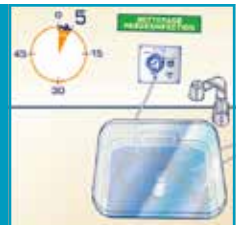

3

水道水で全体をよくすすぎます。
内視鏡器具はチューブの内側と外側両方をよく洗い流してください。

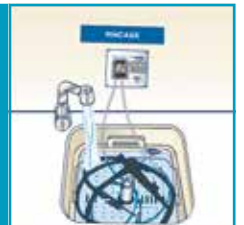

4

清潔なタオルでよく拭いてから滅菌してください。

