

# より安全で確実な 滅菌のために

「プロリール アドバンス」は、  
現場の皆様の「声」から改良を重ね、医療現場など  
厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現しました。



Pride in Protection™

私たちメディコムジャパンは感染管理で社会に貢献します。

メディコムジャパン(A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド)は、カナダのモントリオールを本社とし、医療現場になくてはならない感染管理のための製品を製造販売するヘルスケア企業です。感染管理の先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323  
【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112  
【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074  
【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323  
✉ info@medicom-japan.com 🌐 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.04.03



## よりハードな 環境にも耐える 次世代滅菌ロール

プロリール アドバンス



# PROREEL ADVANCE

オートクレープ/E.Oガス用インジケーター付



## 視認性、作業効率に優れたフィルムデザイン

プロセスインジケータをフィルム側に印刷することで、滅菌物とインジケータの確認が同時に行えます。また、インジケータのインクが転写するリスクを抑制します。

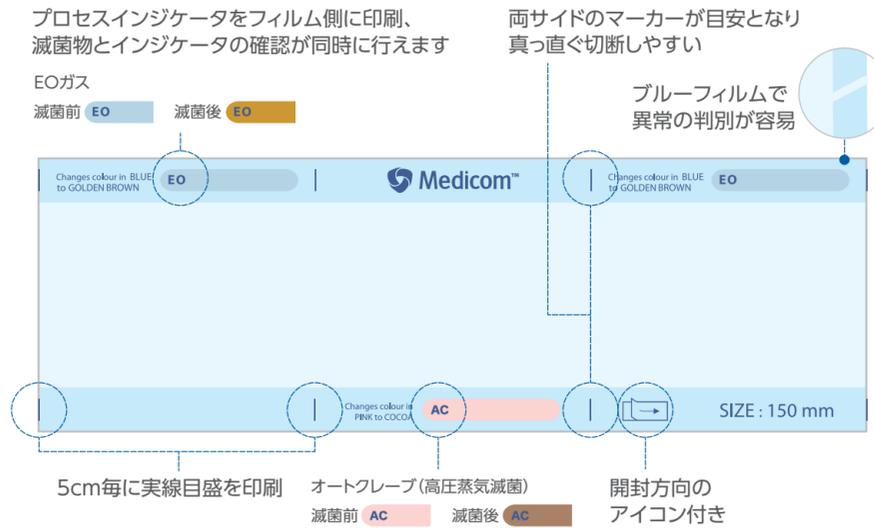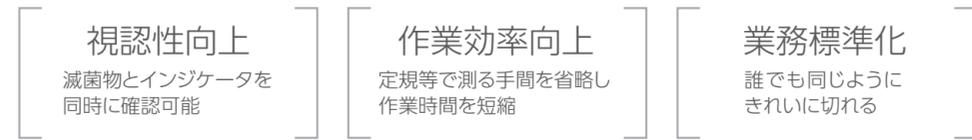

## 国際規格に適合した滅菌包装材料

- POINT 1 **高い透気度**  
透気度を高め、蒸気の浸透性及び空気の排除性能を上げ、滅菌効率を向上。
- POINT 2 **高いシール強度**  
シール強度を高め、滅菌中の圧力による破袋リスクを軽減。
- POINT 3 **厚みのある高耐久性ブルーフィルム**  
厚みのあるフィルムを使用し、強度と耐久性を強化。鋭利な器材による穿孔を抑制し破袋リスクも軽減。

大型の滅菌器で大量の滅菌物の処理にも対応

## 現場での機能性を重視したボックスデザイン

日々の業務をよりスムーズにストレスなく行えます。



## 信頼性の高いインジケータ

乾熱で変色しない、ISO 11140適合の信頼性の高いインジケータを採用。

### インジケータ変色見本




### MEMO

#### 信頼性の高いインジケータで医療事故のリスクを軽減

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)は水蒸気で滅菌を行うため、オートクレーブ用のインジケータは、湿熱で変色しなければなりません。滅菌器の予熱やヒートシーラーとの接触により変色してしまうと、滅菌されていないものも滅菌済みと誤認してしまうため、医療事故が発生してしまいます。プロリール アドバンスのインジケータは乾熱で変色せず、湿熱で要件をみたした場合のみ変色する仕様です。

WHOは手術部位感染(SSI)は欧米において医療関連感染で2番目に多いと報告しています。

欧米における医療関連感染数

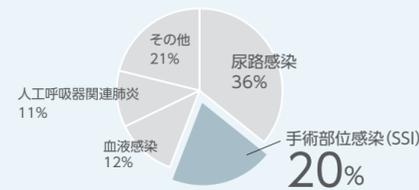

出典:WHO. Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection



オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ISO 11140

品名:プロリール アドバンス 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JPG535010	50mm×200m	34mm	1ロール	4箱	4894476032445
JPG535020	75mm×200m	59mm			4894476032421
JPG535030	100mm×200m	84mm			4894476032407
JPG535040	150mm×200m	134mm			4894476032506
JPG535050	200mm×200m	180mm	2箱	1箱	4894476032469
JPG535060	250mm×200m	230mm			4894476032490
JPG535070	300mm×100m	280mm	1箱	1箱	4894476032551
JPG535080	350mm×100m	330mm			4894476032537
JPG535090	400mm×100m	380mm			4894476032568
JPG535100	500mm×100m	480mm			4894476038782

## タイプIV化学的インジケータ セーフシール 滅菌インジケータカード



- 温度と時間の2つの変数に対応し、紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了(対応温度:115℃~138℃)
- 20mm×70mmの使いやすいサイズで、挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用
- 裏面の余白に日付など情報の記載が可能



オートクレーブ用 TYPE 4 STEAM ISO 11140

品名:セーフシール 滅菌インジケータカード

品番	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JIC530010	200枚	100箱	4894476023573

※インジケータの色は実際の色とは異なります。※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。