

SafeBasics

Self-Sealing Sterilization Pouches
セーフベーシック 滅菌シールパウチ

Type4インジケータは付属しません。

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合

信頼のテープシール付滅菌パウチ

「セーフベーシック 滅菌シールパウチ」は、強力粘着テープで封緘するシーラー不要の滅菌パウチです。ISO 11607及びEN 868に適合した性能要求テストをクリア。ISO 11140・Type1のプロセスインジケータ*を採用。メディコムは世界で滅菌包材を販売しているため、メディカルデバイスの国際規格に適合した商品を提供しています。

滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。

オートクレーブ
EOガス両用

クラスB
滅菌器対応

PVA不使用

ISO 11607

EN 868

ISO 11140



6
サイズ
展開


*インジケータの色は実際の色とは異なります。

*インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

メディコムの滅菌バッグで「トラブル軽減」

信頼性の高いインジケータ (ISO 11140適合)

メディコムの滅菌バッグのType1プロセスインジケータ※は、滅菌器の余熱やヒートシーラーとの接触といった乾熱では変色しにくいいため、医療事故のリスクを低減します。滅菌工程の通過を一目で確認できる滅菌バッグです。

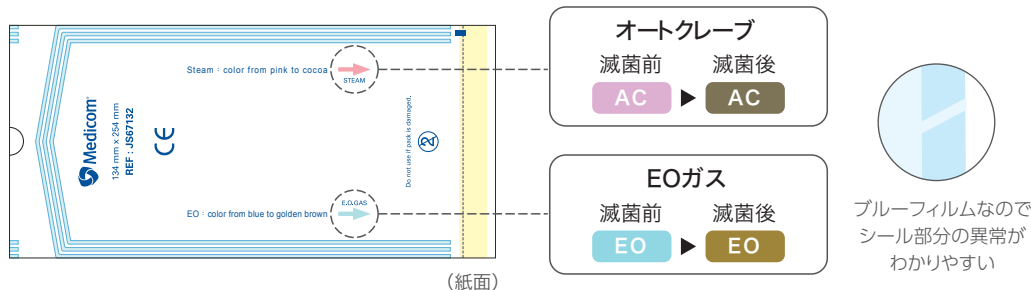

PVA**を使用していない

PVAが溶け出し、被滅菌物(ハンドピースなど)に付着するといったトラブルを軽減できます。

リント(紙粉)が出にくい


リントが出にくく、リントが滅菌器のフィルターに詰まるといったトラブルを軽減できます。

豊富なサイズ展開で無駄なく使い分けが可能



「セーフベーシック 滅菌シールパウチ」は、6サイズ展開。

例えば頻繁に滅菌するタービン・コントラにも、ぴったり入る専用サイズをご用意。無駄なく効率的にお使いいただけます。

タービン・コントラサイズ

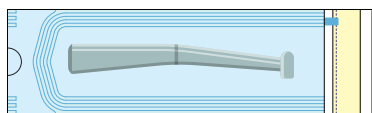

タービン・コントラなどハンドピース類がぴったり入ります

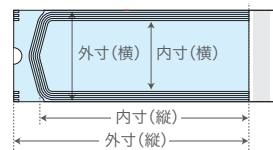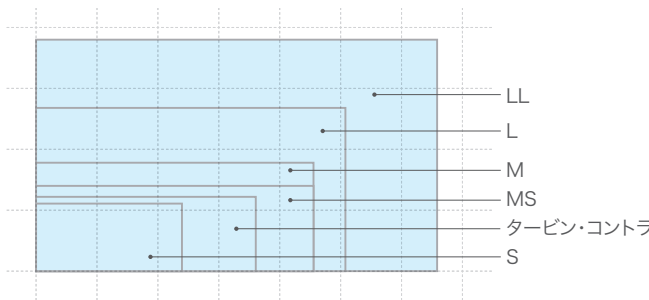

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 EN 868 ISO 11140

品名:セーフベーシック 滅菌シールパウチ

品番	サイズ	用途(サイズの目安)	外寸(横×縦)	内寸(横×縦)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JS67571	S	ファイルやリマーなどの小器具、止血用ガーゼ	57×102mm	37×77mm	200枚	50箱	4894476000611
SFBJS67611	タービン・コントラ	タービンやコントラなどハンドピース類	61×185mm	41×160mm		6箱	4894476036962
SFBJS67702	MS	スケーラーなどのインスツルメント類	70×229mm	50×204mm		10箱	4894476007917
JS67892	M	基本セット(バラ)	89×229mm	69×204mm		10箱	4894476000628
JS67132	L	鉗子などの大きめのインスツルメント類	134×254mm	114×229mm		10箱	4894476000635
JS67193	LL	基本セット(トレーごと)	190×330mm	170×305mm		5箱	4894476000642

※インジケータの色は実際の色とは異なります。

※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

※※PVA(ポリビニルアルコール)とは、水溶性の合成樹脂です。

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ① www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲