


マスクで大切なのは フィット FIT性能

マスク装着時には、鼻のわき、頬、アゴなどにすき間ができやすく、マスクの外の空気が漏れたり直接吸い込まれたりします。すき間が大きいほど、フィルターを通らない空気を多く吸い込んでしまうことになり、マスクの性能を発揮することができません。

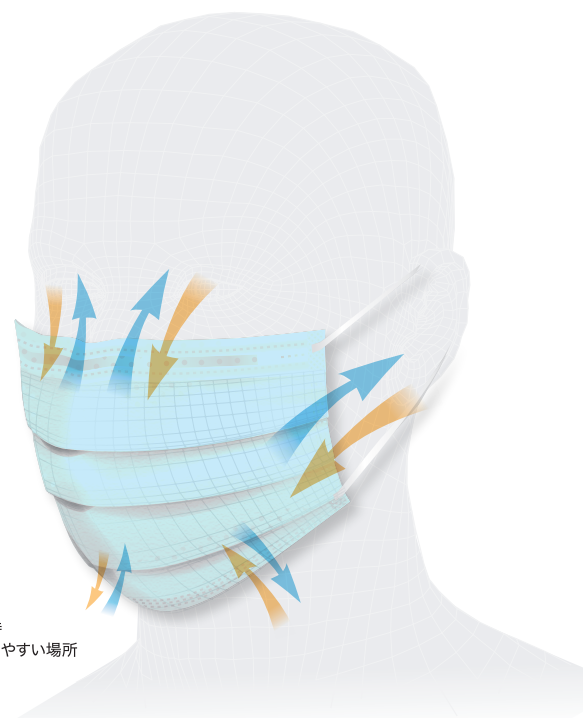

マスク装着時
すき間ができやすい場所

PRO-LANE® Procedure Earloop Face Masks プロレーン®マスク


メディコム プロレーンマスクの高いフィット性能

多くの医療現場でも採用されているメディコム プロレーンマスクは、高いフィット性能を持った高性能・高品質のサージカルマスクです。測定機器による測定結果からも、その高いフィット性能が測定できました。




LEVEL-1

メディコム プロレーンマスクの装着時の漏れ率

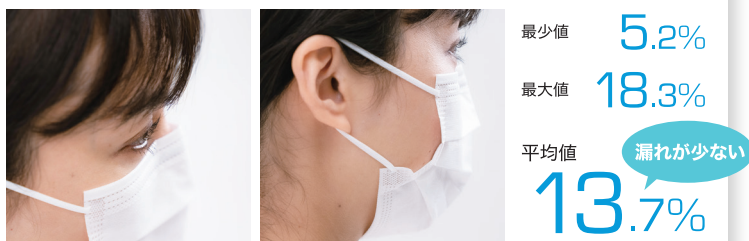

一般的なサージカルマスクの装着時の漏れ率

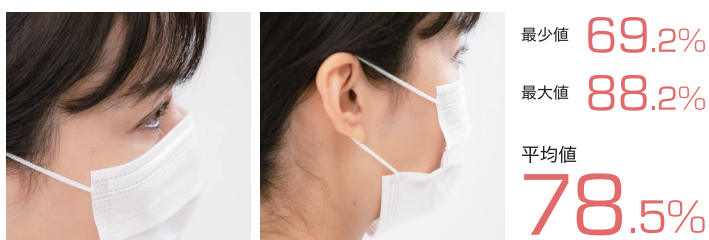

マスクフィッティングの測定機器で マスク着用時の「漏れ」を測定できます。

マスク内への粉じんの侵入率(漏れ率%)は、マスクを着用し、マスクの「外側」と「内側」の粉じん粒子濃度を測定することで求められます。医療現場では、漏れ率を5%以内にするのが推奨されています。

測定原理 レーザー光錯乱方式による粒子個数濃度
(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)


試験粉じん 大気じん
試験粒子径 0.3μm~0.5μm



メディコム プロレーンマスクの フィット FIT 技術

フィット感とキープ力の高い ノーズピース

ノーズピースにはアルミニウム板を採用。鼻へのフィット感とキープ力の高さが特徴です。

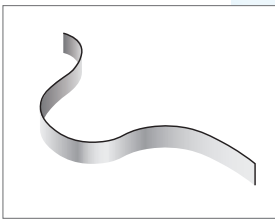

Aluminium Bar

隙間を抑える 外付けイヤーループ

イヤーループと本体の溶着部分をマスクの外側にすることで、溶着部分が肌に接しないように設計されています。

平ゴムタイプの イヤーループ

耳が痛くなりにくい平ゴムタイプのイヤーループ。ソフトで伸縮性のあるポリエステル製で、ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。



隙間をなくす フェイスライン

サイドのフェイスラインがマスクと肌の隙間を抑制します。

LEVEL-1

	品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
	PLE0002714	ホワイト	89mm×178mm	1ケース/10箱(1箱/50枚)	4897008632441
	PLE0002715	ブルー	89mm×178mm	1ケース/10箱(1箱/50枚)	4897008632458
	PLE0002716	ピンク	89mm×178mm	1ケース/10箱(1箱/50枚)	4897008632465

LEVEL-1 サイズ

	品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
	PLE002714S	ホワイト	89mm×165mm	1ケース/10箱(1箱/50枚)	4897008636135
	PLE002716S	ピンク	89mm×165mm	1ケース/10箱(1箱/50枚)	4897008636142

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
【代表】
TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323
✉ info@medicom-japan.com  www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲