

# ANIOSYME PRIME

## アニオザイム プライム

アニオザイム プライム  
ANIOSYME PRIMEは、診療器具の予備洗淨に使用する除菌・洗淨剤です。酵素によって、血液などのタンパク質汚れが凝固するのを防ぎ、優れた洗淨効果を発揮します。



品番：ANI2367544  
入り数：1ケース/12本  
定価：¥4,000/本  
EANコード：3597610409707

### 特長

- ✓ 3種類の酵素が、固着しやすい血液・タンパク質汚れを強力に分解してすっきりと落とします。
- ✓ 高密度な泡で、診療器具の汚れを均一にカバーします。
- ✓ 塩素やアルデヒドが含まれていませんので、器具の腐食やタンパク質汚れの凝固の心配がありません。
- ✓ 中性タイプのため、器具の材質を選ばずお使いいただけます。
- ✓ 手になじみ、使いやすい形状のスプレーボトルです。

### 除菌効果

多種多様なウイルス、バクテリア等に除菌効果を発揮します。

### 主成分

第四級アンモニウム塩、非イオン性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、賦形剤、酵素複合体(プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ)

### 容量

- ・ 750ml入りスプレーボトル

### ご使用になる前に

- ・ 安全のため、グローブ・ガウンを着用してください。

### その他ご注意ください

- ・ 5°C~35°Cの間で保管してください。
- ・ お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所には保管しないでください。

### 使用方法

1

本品をあらかじめ浸漬槽にスプレーしておき、その上に洗淨する診療器具を並べます。



2

その上からもう一度スプレーし、器具全体をまんべんなく泡で覆うようにします。



3

浸漬槽にきちんと蓋をします。



4

所定の時間が経過したら、流水で器具をすすいでください。その後、機械による洗淨、または手作業での洗淨を行ってください。

