

取扱説明書（セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済）

本品を使用する際は、本取扱説明書で各構成品の目的と使用方法をご確認ください。なお、使用方法は一般例です。各施設で使用方法のガイドラインなどがある場合は、医師、歯科医師または現場責任者の指示に従いご使用ください。また、本品はティスポーザブル製品のため、再使用および再滅菌はおやめください。

【セーフドレープ 歯科用 サージカルドレープパック 滅菌済 製品構成】

製品構成	目的・使用方法	
サージカルガウン	目的	術者および介助者のための手術用ガウンです。術者および介助者の身体およびその被服を血液や体液などの汚染から保護するためにご使用いただけます。
	使用方法	① 本品を展開し、両腕を通します。 ② 首元の面テープをつけます。 ③ 内紐を結びます。 ④ 外紐を結びます。
ユーティリティドレープ	目的	器械台を保護するため、滅菌された無菌の医療機器などを置くため、患者用穴あきドレープで覆いきれていない身体を保護するためなど、さまざまな用途にご使用いただけます。
	使用方法	① 本品を展開し、固定用テープのライナー紙を剥がします。 ② 上記の目的に沿い、器械台を覆う、医療機器などの下に敷く、患者を覆うなどを行います。
患者用穴あきドレープ	目的	術野への異物混入や汚染などのリスクを防ぐためにご使用いただけます。
	使用方法	① 本品の術野孔周辺にあるライナー紙を剥がします。 ② 本品を展開の上適用部位に貼付または配置し、患者を覆います。
ドリルスリーブ	目的	ハンドピース（タービン、コントラアングルなど）やバキューム、3WAY シリンジなどのチューブ類を、血液や消毒剤などの汚染から保護し滅菌域を確保するためにご使用いただけます。
	使用方法	① スリーブを保護したい箇所に被せます。 ② 台紙をはずします。 ③ ライナー紙をはがして固定します。
スーチャーバッグ	目的	縫合糸やガーゼの廃棄などにご使用いただけます。
	使用方法	① バックテーブルやサイドテーブルなどに吊り下げます。 ② 使用後の縫合糸などを入れます。
梱包材	目的	異物混入及び内容物の汚損を防ぐために内容物をまとめて包んでいます。
	使用方法	梱包材展開時、滅菌域を確保するためなどにもご使用いただけます。
アルミホイル	目的	無影灯を保護し滅菌域を確保するためなどにご使用いただけます。
	使用方法	无影灯のハンドルなどに巻きます。

以上